


Distributeur

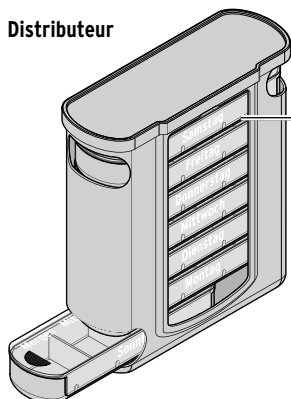


Vue générale (contenu de la livraison)

Piluliers journaliers

Samstag	Samedi
Freitag	Vendredi
Donnerstag	Jeudi
Mittwoch	Mercredi
Dienstag	Mardi
Montag	Lundi
Sonntag	Dimanche

Coupe-pilules

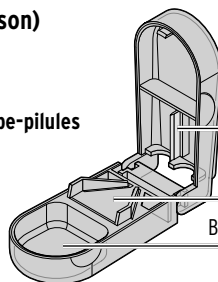

Lame

Porte-comprimé

Bac de récupération

Pilulier journalier



Compartiment

Morgen	Mittag	Abend	Nacht
Matin	Midi	Soir	Nuit

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 150964FV03X00XVI • 2025-10

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour trier les pilules, les comprimés et les gélules et pour couper les comprimés.

L'article n'est pas adapté aux médicaments liquides. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient

pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger pour les jeunes enfants

- Tenez les jeunes enfants éloignés de l'article. Conservez-le hors de leur portée.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Pour votre sécurité

- Le pilulier ne peut pas protéger contre une mauvaise prise ou un mauvais dosage des comprimés. Les personnes qui ne sont pas en mesure de contrôler la prise correcte de l'article ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

- Si les comprimés sont mélangés et ne peuvent plus être identifiés avec certitude, contactez immédiatement votre médecin.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de prise incorrecte de comprimés.

- En raison de la composition de certains médicaments qui ne doivent être ni coupés ni réduits en poudre, nous vous recommandons de vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si le coupe-pilules peut être utilisé pour votre indication. Cet appareil ne convient pas aux comprimés et gélules à libération prolongée ou gastro-résistants.

- La lame en acier inoxydable est très tranchante. Manipulez le pilulier avec précaution et tenez-le hors de portée des enfants. Risque de blessure!

Nettoyage

- ▷ Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces à l'eau chaude et avec un peu de produit vaisselle. Toutes les pièces passent également au lave-vaisselle jusqu'à +40 °C maximum.
- ▷ Laissez ensuite bien sécher toutes les pièces.
- ▷ Nettoyez le coupe-pilules et les piluliers journaliers après chaque nouvelle utilisation, le distributeur lorsque nécessaire.

Utilisation

Cet article contribue à la prise correcte de comprimés.

Remplir

1. Triez les comprimés 1x par semaine dans les compartiments correspondants des piluliers journaliers.


Les comprimés correspondants sont préparés en fonction de l'heure et du jour de prise ainsi que du dosage.

Veillez à ce que les piluliers journaliers soient bien fermés afin que les comprimés ne puissent pas tomber.


Les rations quotidiennes individuelles sont petites et maniables, ce qui les rend idéales pour les déplacements.

2. Glissez-les ensuite dans l'ordre des jours de la semaine dans le haut du distributeur. Commencez de préférence par le lundi.


Retirer

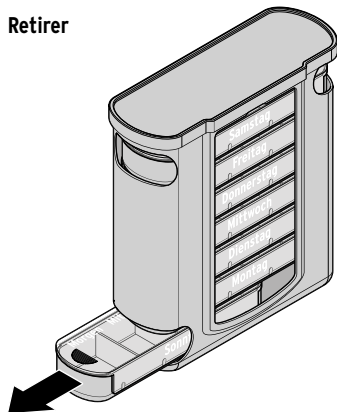

1. Retirez le pilulier correspondant au jour par le bas du distributeur.




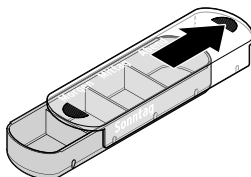


2. Ouvrez la pilulier journalier et retirez les comprimés du compartiment correspondant à l'heure concernée. Refermez le pilulier journalier à chaque fois.

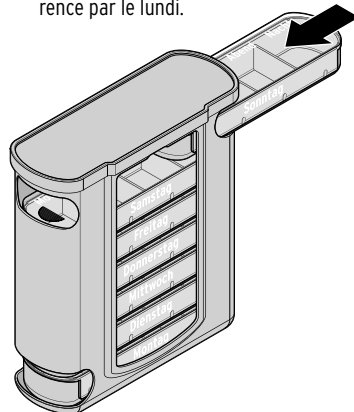

3. Glissez le pilulier journalier vide dans le haut du distributeur.

Découper des comprimés

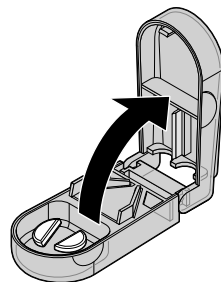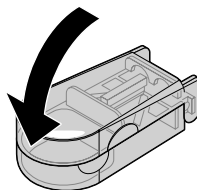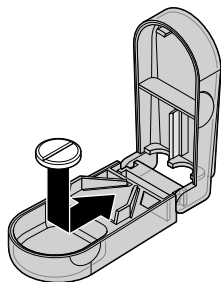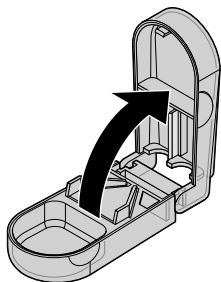

1. Ouvrez le coupe-pilules.
2. Placez le comprimé dans le porte-comprimé comme indiqué.
3. Fermez le pilulier et abaissez le couvercle.
4. Ouvrez le coupe-pilules. Le comprimé divisé se trouve dans le bac de récupération.