



Boxenspender

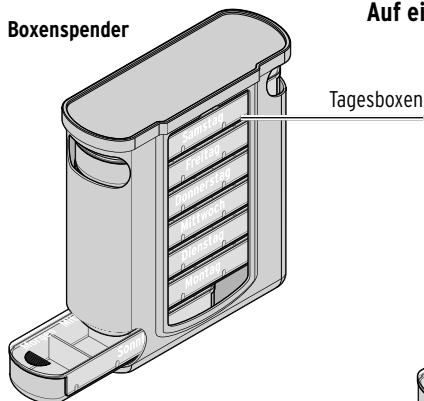


Auf einen Blick (Lieferumfang)

Pillenschneider

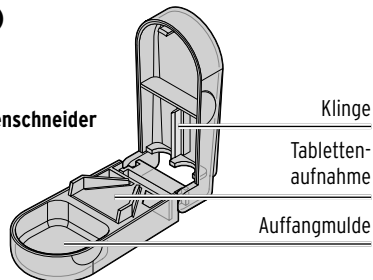

Tagesbox

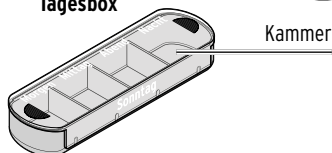

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 150964FV03X00XV1 · 2025-10

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Dieser Artikel ist zum Sortieren von Pillen, Tabletten und Kapseln und zum Schneiden von Tabletten vorgesehen. Für flüssige Medikamente ist der Artikel ungeeignet. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kleinkinder

- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern. Bewahren Sie ihn außerhalb deren Reichweite auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit

- Die Pillenbox kann nicht vor falscher Einnahme oder Dosierung von Tabletten schützen. Personen, die nicht in der Lage sind, die korrekte Einnahme zu kontrollieren, dürfen den Artikel nicht ohne Aufsicht benutzen.

- Sollten Tabletten durcheinander geraten sein und nicht mehr einwandfrei zugeordnet werden können, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für die unkorrekte Einnahme von Tabletten.
- Aufgrund der Zusammensetzung bestimmter Medikamente, die weder zerteilt noch pulverisiert werden dürfen, empfehlen wir Ihnen mit Ihrem Arzt oder Apotheker abzuklären, ob der Pillenschneider bei Ihrer Indikation angewendet werden darf. Nicht geeignet ist dieses Gerät für Retard- oder magensaftresistente Tabletten und Kapseln.

- Die Klinge aus rostfreiem Stahl ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig mit dem Pillenschneider um und halten Sie ihn von Kindern fern. Es besteht Verletzungsgefahr!

Reinigen

- ▷ Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Alle Teile sind auch spülmaschinengeeignet bis max. +40 °C.
- ▷ Lassen Sie alle Teile anschließend gut trocknen.
- ▷ Reinigen Sie den Pillenschneider und die Tagesboxen nach jedem weiteren Gebrauch, den Boxenspender bei Bedarf.

Gebrauch

Dieser Artikel unterstützt die korrekte Einnahme von Tabletten.

Befüllen

1. Sortieren Sie die Tabletten 1x pro Woche in die entsprechenden Kammern der Tagesboxen.


Die entsprechenden Tabletten werden nach Einnahme-Tages- und Wochenzeit und Einnahme-Menge vorbereitet.

- Achten Sie darauf, dass die Tagesboxen fest verschlossen sind, damit die Tabletten nicht herausfallen können.


Die einzelnen Tagesrationen sind klein und handlich und damit auch ideal für unterwegs.

2. Schieben Sie sie dann in der Reihenfolge der Wochentage oben in den Boxenspender. Beginnen Sie vorzugsweise mit Montag.


Entnehmen

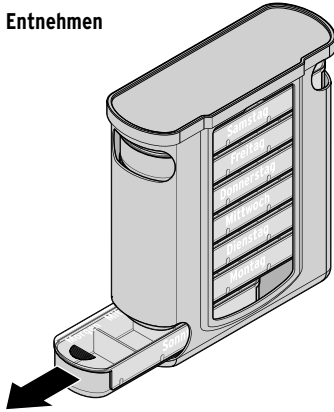

1. Ziehen Sie die aktuelle Tagesbox unten aus dem Boxenspender heraus.

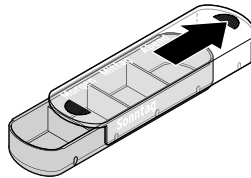


2. Öffnen Sie die Tagesbox und nehmen Sie die Tabletten zur jeweiligen Tageszeit aus der entsprechenden Kammer heraus. Verschließen Sie die Tagesbox jedes Mal wieder.

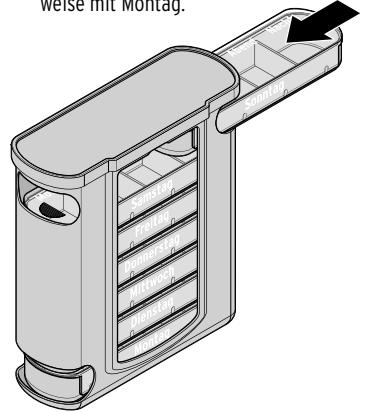


3. Schieben Sie die leere Tagesbox oben in den Boxenspender.


Tablette schneiden

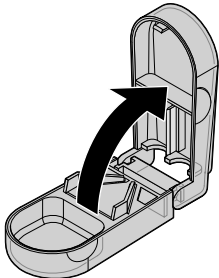


1. Öffnen Sie den Pillenschneider.

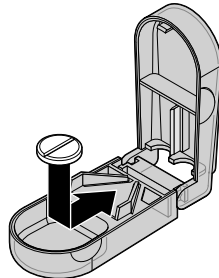

2. Setzen Sie die Tablette wie abgebildet in die Tablettenaufnahme.

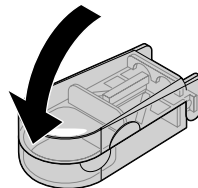

3. Schließen Sie den Pillenschneider und drücken Sie den Deckel hinunter.

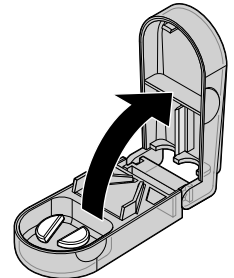

4. Öffnen Sie den Pillenschneider. Die Tablette liegt zerteilt in der Auffangmulde.